

◀ RASGUE AQUÍ

RASGUE AQUÍ ▶

QuikClot® EMS Rolled Gauze

Para uso externo temporal para
controlar hemorragias traumáticas
UN (1) APÓSITO HEMOSTÁTICO DE 7,5 CM X 1,2 M (3 IN X 4 FT)



Hecho en EE. UU.

REORDER 475

The Netherlands
The Hague
2514 AP
Prinsessegracht 20
Emergo Europe



101311-01-WEBESLA Rev I 2023-10
Contiene caolín.

Todos los derechos reservados.

© 2016 Z-Medica, LLC

Patentes: Z-Medica.com/patents.aspx

QuikClot.com

Fax: 1.800.343.8656, +1.203.303.7216

Tel: 1.877.750.0504, +1.203.294.0000

Wallingford, CT 06492 USA

4 Fairfield Boulevard

Z-Medica®, LLC

Fabricado por:

Retiro del producto: 1. Retire suavemente la gasa de la herida. 2. Irrigar abundantemente la herida.



1. Abra el empaquetado y retire la Rolled Gauze. Conserve el empaquetado vacío.



2. Coloque la Rolled Gauze dentro de la herida y utilícela para aplicar presión directamente sobre el origen de la hemorragia. Se puede requerir más de una Rolled Gauze.



3. Siga aplicando presión durante 3 minutos o hasta que la hemorragia se detenga.



4. Envuelva y ate un vendaje para mantener la presión. Busque atención médica de inmediato. Muestre las instrucciones de RETIRO DEL PRODUCTO que se encuentran en el empaquetado al personal médico.



ADVERTENCIAS: Solo para uso externo. No se garantiza la esterilidad si el empaquetado está dañado o abierto. Descarte el empaquetado si está dañado. Evite el contacto con los ojos. La reutilización causará riesgo de infección y pérdida de eficacia.

PARA EL USO POR PERSONAL DE EMERGENCIA ENTRENADO

RETIRO DEL PRODUCTO: 1. Retire suavemente la gasa de la herida. 2. Irrigar abundantemente la herida.

◀ RASGUE AQUÍ

▶ RASGUE AQUÍ